



SafeCup[®]
Vagisan

In der Regel sicher.

SafeCup[®] Vagisan

In der Regel sicher.



Die Menstruationstasse aus der Apotheke

- 100% medizinisches Silikon der höchsten Qualitätsstufe („Herzklappen-Qualität“)
- Kein Auslaufen bei sicherem Sitz in der Scheide, egal ob bei starker oder schwacher Regel
- Angenehme Tragedauer bis zu 6 Stunden (medizinisch empfohlen)
- Trocknet die Scheide nicht aus
- Ohne Zusatz von Farbstoffen, Bleichmitteln, Weichmachern
- Geprüft auf Zytotoxizität und Biokompatibilität (bezüglich Irritations- und Sensibilisierungspotenzial)
- Umweltbewusst und wirtschaftlich (mehrere Jahre verwendbar)



Perfekt
bei
Klausuren!
Ich brauche
endlich keine
Angst mehr zu
haben, dass ich
auslaufe...



Super beim
Sport, in der
Sauna oder beim
Schwimmen.
Sicherheit ohne
Gefahr, dass
das Bändchen
rausschaut!



Wenn ich länger
unterwegs bin
hab ich
einfach 'ne
zweite
SafeCup in der
Tasche.
Easy!



Viel **günstiger**
als ständig
Tampons
zu kaufen.
Und es entsteht
kein Müll. Also
total **umwelt-
freundlich!**



Echt
praktisch auf
Reisen!
Man hat ja
nicht immer die
Möglichkeit,
Tampons zu
kaufen.

Liebe SafeCup-Entdeckerin,

wir wissen: eine Menstruationstasse zum ersten Mal zu verwenden kostet etwas Überwindung. Wie wendet man sie richtig an? Wie und wie oft reinige ich die SafeCup? Sitzt die Tasse auch sicher? Ist das Tragen nicht unangenehm? Zu Anfang haben Sie sicher viele Fragen.

Doch lassen Sie sich nicht entmutigen, die Menstruationstasse auszuprobieren. Es lohnt sich: Die SafeCup ist eine echte Alternative zu Tampons oder Binden. Mit ein bisschen Übung sitzt sie über viele Stunden zuverlässig und bequem. Weitere Pluspunkte: Sie sparen Geld und tun Gutes für die Umwelt!

Größenratgeber für die SafeCup



Der wichtigste Indikator zur Feststellung der richtigen Größe ist die Stärke der Periode:

Leichte bis normale Periode



Stärkere Periode



Wenn Sie die Stärke Ihrer Periode nicht klar einordnen können, sind die folgenden Indikatoren zusätzlich hilfreich, die optimale SafeCup-Größe zu finden:

Vaginale Geburten (die Anatomie kann sich durch die Geburten verändern; oftmals ist die Blutung auch stärker)



Gut trainierter Beckenboden (Frauen, die regelmäßig Sport treiben)



Anwendung der SafeCup Vagisan

SafeCup und Box vor bzw. nach jeder Anwendung desinfizieren.

Inhalt in die Toilette entleeren und mit kaltem Wasser und etwas milder Waschlotion reinigen.

In entspannter Position die SafeCup leicht mit den Fingern eindrücken, um das Vakuum zu lösen und vorsichtig herausziehen.

Nach 6 Stunden entfernen (medizinisch empfohlen).

**Vor jedem Gebrauch
Hände gründlich waschen!**

Desinfektion: SafeCup 5 Minuten in die Mikrowelle geben (750W) oder in einem Topf 7 Minuten auskochen.

Die SafeCup falten und in die Scheide einführen, bis das untere Ende der Tasse etwa 1 cm vom Scheideneingang entfernt sitzt.

Nach dem Loslassen entfaltet sich die Tasse von selbst und sitzt sicher am unteren Ende der Scheide.

Beliebte Faltungen:



SafeCup[®] Vagisan

NEU

In der Regel sicher.



- ✓ Gesicherte Qualität
- ✓ Wissenschaftlich untersucht
- ✓ Mit praktischer Desinfektionsbox
- ✓ In der Apotheke erhältlich

www.safecup.de

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel · Sudbrackstr. 56 · 33611 Bielefeld

DR·WOLFF

88553/V0119